

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示の例



⊘記号は、「禁止」の行為であることを告げる内容です。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告






強制


次の人は必ず医師と相談のうえ使用する。事故や体調不良を起こす原因になります。




- 医師の治療を受けている人や特に身体に異常を感じている人
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 生理中や妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷や異常のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上（有熱期）の人
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性（疼痛性）疾患の人
- 背骨に異常のある人や曲がっている人
- 認知症の症状のある人
- 血圧に異常のある人
- かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
- 医師により入浴や運動を止められている人
- やけど、けが、お灸、手術後で完治していない人



その他使用に際して不安や心配のある人は、使用前に必ず専門医と相談のうえ、その指示に従う。また、使用しても効果が現れない場合にも医師と相談する。

 強制	<p>使用中に身体に異常があらわれたり、異常を感じたりしたときには直ちに使用を中止し、医師に相談する。事故や体調不良を起こす恐れがあります。</p>
	<p>使用前に本体の表地が破れていないか確認する。また、その他の部分の表地にも破れがないか確認する。破れがある場合には直ちに使用を中止し、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く。けがや事故、感電の恐れがあります。修理を『お買い上げの販売店』または弊社『お客様相談室』にご依頼ください。</p>
	<p>リクライニングやフットレストを操作するときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。けがや事故の原因になります。</p>
 禁止	<p>医師からマッサージを禁じられている人は使用しない。体調不良を起こす原因になります。</p>
	<p>自分で意思表示や操作ができない人、幼児への使用はさせない。けがや事故の原因になります。</p>
	<p>子供には付添いなしでは使用させない。また、本体の上で遊ばせたり、乗らせたりしない。けがや事故の原因になります。</p>
	<p>頭部、腹部、ひじ、ひざには使用しない。けがや体調不良の原因になります。</p>
	<p>背もたれと座のすき間や座とひじ掛けやフットレストのすき間、マッサージ機構部などに、手や足などを入れない。けがや事故の原因になります。</p>
	<p>交流100V、50/60Hz以外の電源では使用しない。また、電源は交流100V専用コンセントを使用する。火災や感電の原因になります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>電源コードなどのコード類を傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、本体に巻きつけたり、熱器具に近づけて使用したりしない。また重いものを載せたり、挟み込んだりしない。火災や感電の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理、改造はしない。火災や感電、けがの原因になります。修理を『お買い上げの販売店』または弊社『お客様相談室』にご依頼ください。</p>

注意

 強制	<p>使用前に正常に作動することを確認する。また、しばらく使用していなかったあとに使用するとき、正常かつ安全に作動することを確認する。思わぬ事故の恐れがあります。</p>
---	---

 強制	<p>使用時間は1回を15分までとし、1日に1～2回で体調に合わせて使用する。 筋肉や皮膚、神経などに対して必要以上の刺激となる恐れがあります。</p>
	<p>もみ玉の位置を確認してから座り、背もたれ部分にもものがないことを確認し、マッサージを行う。 けがや事故の原因になります。</p>
	<p>電源プラグは確実に最後まで差し込む。 感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く。 感電やショート、発火の原因になります。</p>
 電源プラグを抜く	<p>使用していないときは、電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 思わぬ事故の恐れや絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>停電したときは、直ちに電源プラグをコンセントから抜く。 復帰したときに危険です。</p>
	<p>動かない場合や、異常のある場合には直ちに使用を中止し、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く。感電や漏電、ショートなどによる火災の恐れがあります。 修理を『お買い上げの販売店』または弊社『お客様相談室』にご依頼ください。</p>
	<p>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。 感電やけがをする恐れがあります。</p>
 禁止	<p>他の治療器と同時に使用しない。 思わぬ事故やけがをする恐れがあります。</p>
	<p>治療目的以外には使用しない。 故障や事故の原因になります。</p>
	<p>同時に2人以上で使用しない。1人で正しい姿勢で使用する。 けがや故障、破損の原因になります。</p>
	<p>飲酒後や食後30分以内の人は使用しない。 事故や体調不良を起こす原因になります。</p>
	<p>使用中は眠らない。 思わぬ事故やけがをする恐れがあります。</p>
	<p>素肌やぬれた身体では使用しない。 皮膚をいためる恐れや感電、故障の原因になります。</p>
	<p>クッションをはずして使用しない。 けがや事故の原因になります。</p>

 禁止	<p>頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。 けがをする恐れがあります。</p>
	<p>背もたれやひじ掛け、フットレストに乗ったり、座ったりしない。 けがや事故、破損の原因になります。</p>
	<p>マッサージ機構部へ無理な力をかけたり、定格時間を超えて使用しない。 事故や故障、破損の原因になります。</p>
	<p>リモコンを落としたり、上に乗ったり、引っ張ったり、ぬれた手で操作したりしない。 感電や故障、破損の原因になります。</p>
	<p>プラグ類にピンやゴミ、水分などを付着させない。 感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを切らない。 事故や故障、破損の原因になります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>本体やリモコンを水などでぬらさない。 感電や故障の原因になります。</p>

注意 (設置・移動について)

 アースをつける	<p>アースを確実に取り付ける。 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アースの取り付けは、お近くの『電気店』にご相談ください。</p>
 強制	<p>突起物や障害物のない水平な場所で使用する。 事故や故障、破損の原因になります。</p>
 禁止	<p>ホットカーペットやストーブなど、暖房器具の上や近くで使用しない。 火災や故障の原因になります。</p>
	<p>フローリングや畳の上に直に置かない。 床を傷つける恐れがあります。</p>
	<p>引きずったり、人を乗せたまま移動しない。 けがや事故、破損の原因になります。</p>
	<p>本体を落としたり、衝撃を加えたり、乱暴な扱いはしない。 床を傷つける恐れや故障、破損の原因になります。</p>
 水場使用禁止	<p>浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。</p>