

安全のために必ずお守り下さい

絵表示について この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い戴くため、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。



警告

記載されている内容を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。



注意

記載されている内容を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れのあることを示します。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。
(～してはいけません。)



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
(～して下さい。)




絵表示に対する行為を禁止することを告げるものです。



警告

使用上の注意

ベッドの操作を行う際には、寝ている方やベッド周辺の安全を確認しながら操作して下さい。何らかの危険を感じた時には、すぐに操作を中止して下さい。ケガをしたり、故障の原因となります。

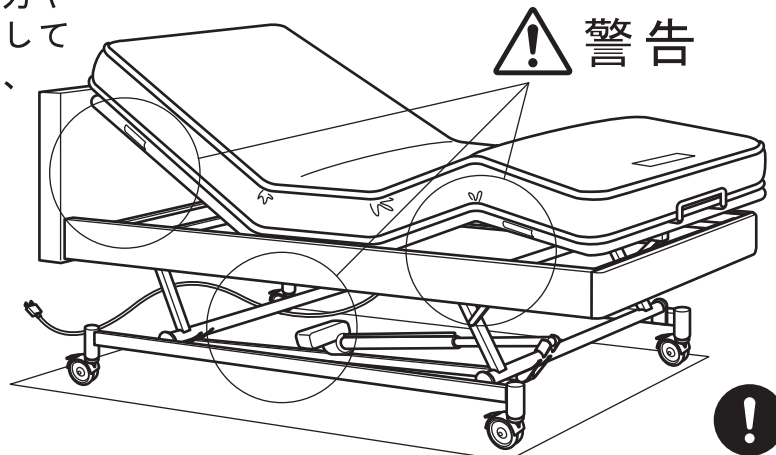


小さなお子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がご使用になる場合は付添いの人が操作を行って下さい。

取扱説明書・警告ラベルには安全に使用する上で重大なことが書かれており、この内容が理解できない人が操作しますと、事故の原因となります。



御使用になる前に、体に不安のある方や現在治療中の方はかかりつけの医師に相談してからお使い下さい。

ベッドの背上げ、脚上げ機能を利用することで症状を悪化させる可能性があります。

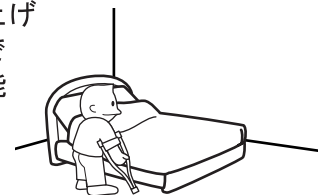


ベッドを操作する際には、寝ている人の頭がヘッドボード側にあり、仰向けに寝た状態で行って下さい。

寝姿勢によっては身体に無理がかかりケガをする恐れがあります。



本製品は1人用ですので2人以上では使用しないで下さい。


重大な事故の原因になります。

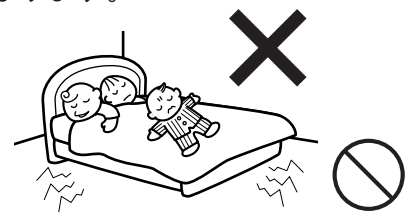


警告

使用上の注意


分解改造しないで下さい。
破損してケガをする
恐れがあります。

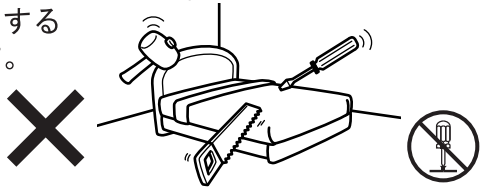

電源コードや電源プラグが痛んだり、
コンセントの差込みがゆるいときは
使用しないで下さい。
感電・ショート・火災の
原因になります。

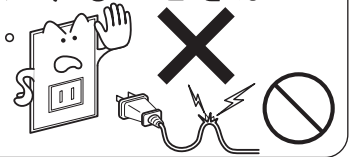


交流100V以外では使用しないで下さい。
感電や火災の原因となります。

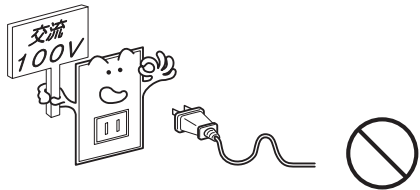


電源コードを傷つけたり、破損したり、
加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、
ねじったり、たばねたりしないで下さい。
また重い物を載せたり、挟み込んだり、
加工したりしないで下さい。
電源コードが破損し、感電や火災の
原因となります。



背上げ、脚上げした状態で背部や脚部に
立ったり腰掛けたり
しないで下さい。
ケガをしたり、破損の
原因になります。

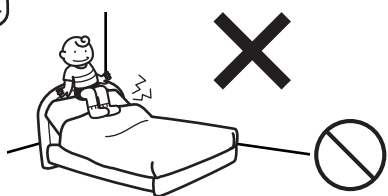


ベッドの下や背上げたトコイタと
フレームの間には
入らないで下さい。
ケガをしたり、破損の
原因になります。

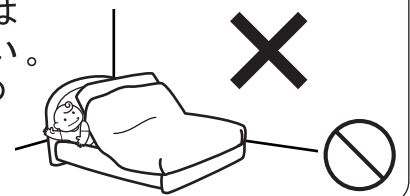


注意

使用上の注意


妊娠中の方や極度に肥満体の方は、ご使用
に際し十分注意して
ご使用下さい。

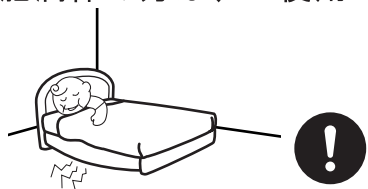


介護・就寝以外での使用はしないで
下さい。
重大な事故の原因と
なります。

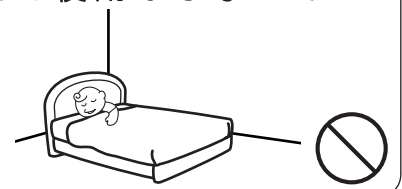


耐荷重は最大100kgfです。体重と寝装品や
付属品を合わせた重量が、100kgfを超える
ときは使用しないで下さい。
ベッドの破損や重大な事故の原因となります。

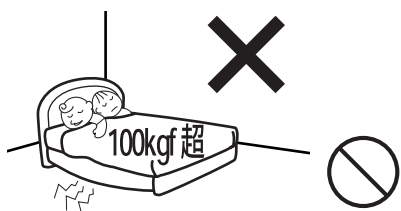


ベッドの重量（商品仕様参照）に十分
耐えられる床の強度を確保して下さい。
又、床の材質によっては、ベッドの接
地面が傷ついたり、きしみ音が出るこ
とがありますので、
極力カーペット類
を使用して床面の
保護を行って下さ
い。

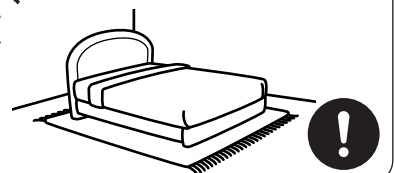

マットレスは、無理に折り曲げないで
下さい。
変形や破損の原因になります。

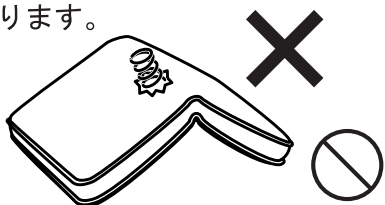

キャスター脚は必ず固定して下さい。
固定しないで使用していると、思わぬ時に動いて
事故の原因になります。

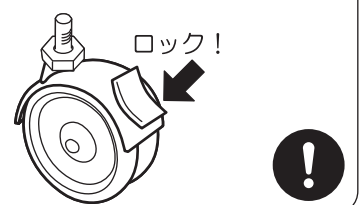


⚠ 注意

使用上の注意

ベッドの操作を行う際には、寝ている方やベッド周辺の安全を確認しながら操作して下さい。何らかの危険を感じた時には、すぐに操作を中止して下さい。

ケガをしたり、故障の原因となります。

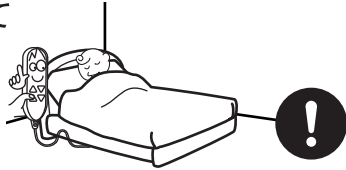

背上げ、脚上げなどの電動操作を長時間（2分以上）連続で行わないで下さい。


連続運転の為モーターが熱を持つとモーターの過熱防止保護回路が働きモーターが動かなくなります。

次に使用する時は十分に時間をおいてから使用して下さい。




コントローラーの操作ボタンは、同時に2つ以上押さないで下さい。

加熱や故障の原因となります。

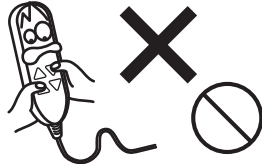

コントローラーはふとんの中に入れて下さい。

加熱や故障の原因となります。

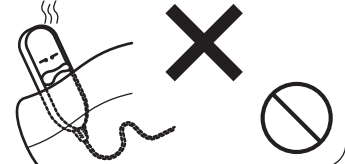

モーターやコントローラーに水やジュースなどの液体をこぼさないで下さい。


感電や故障の原因となります。



マットレスには向きがあります。必ずマットラベルを

フットボード側にして下さい。

曲げられなくなります。

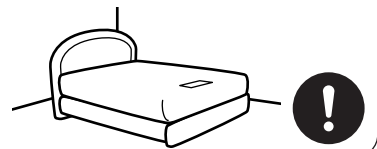


しばらく使用していなかった場合は、必ず人が乗る前にベッドの作動が正常かつ安全である事を確認して下さい。

作動が異常ですと、思わぬ事故の原因になります。




電源コード及びコントローラーのコードを無理に曲げたり、つぎ足したり、リクライニング部にはさんだりしないで下さい。

コードが破損し感電・火災の原因となります。

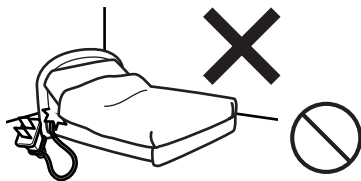

電源コードの上に重い物を載せたり、コードがベッド（レッグやキャスター等）の下敷きにならないようにして下さい。

コードが破損し感電・火災の原因となります。

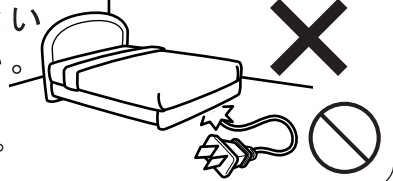


電源プラグや電源コード及びコントローラーには濡れた手で触らないで下さい。

感電する恐れがあります。




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いて下さい。

コードが破損し感電・火災の原因となります。

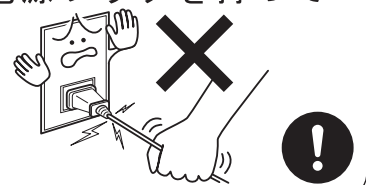


ベッドの電源はなるべく直接コンセントから取って下さい。

コンセントや延長コードの容量を越える電気製品を同時に接続使用しないで下さい。電源コードや電源プラグが発熱する恐れがあります。

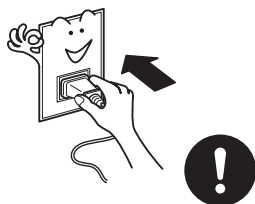

ベッドを動かす場合や長期間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因となります。

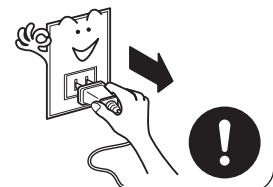


⚠ 注意


使用上の注意

壁面や周囲の家具類から少し離して設置して下さい


ベッドフレームと壁面や周囲の家具類、コンセント類との接触による傷を防ぐため5cm以上離して設置して下さい。

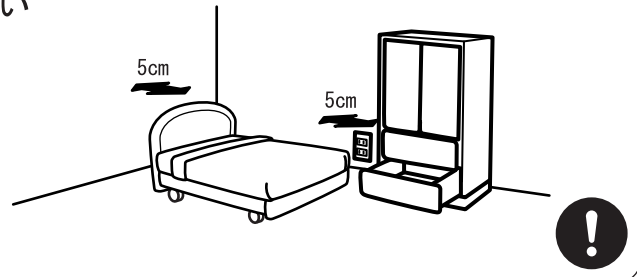


ヘッドボードの後ろに物などを置かないで下さい。
ベッドの破損や重大な事故の原因となります。

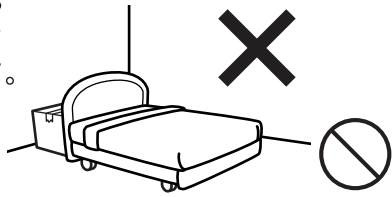

ヘッドボードに物をかけたり、取り付けてご使用になる場合は周囲との距離を十分にとってください。
ベッドの破損や重大な事故の原因となります。

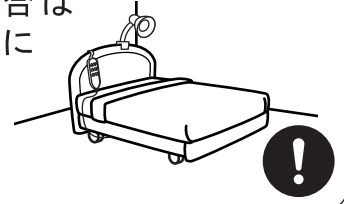

ベッド周辺にお子さまやペットなどがいる時は安全を確認しながら操作して下さい。
何らかの危険を感じた時には、すぐに操作を中止して下さい。
思わぬ重大な事故の原因となります。

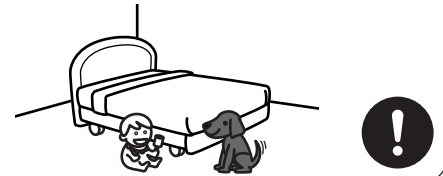

ハイロー（昇降）作動時はヘッドボードに手をかけたり、後ろに体を入れた状態で操作しないで下さい。
壁や周囲の家具類に接触し、挟まれてケガをしたり重大な事故の原因となります。

