

# 1. 安全のために必ずお守りください

## 絵表示について

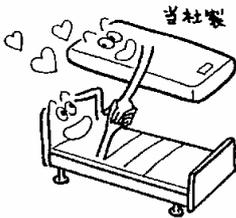
この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しく使用していただき、使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の絵表示をしています。

その指示と内容は、次のようになっています。

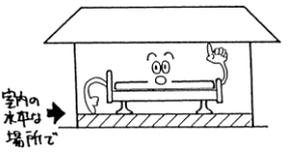
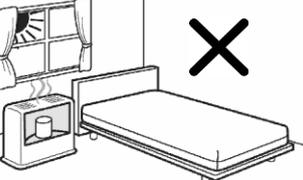
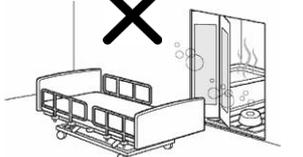
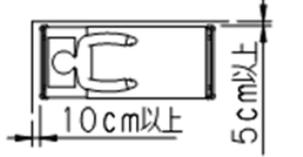
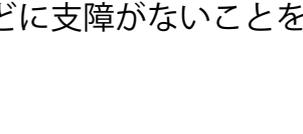
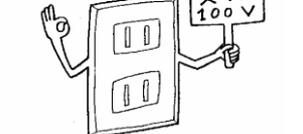
内容をよく理解してから本文を読んでください。

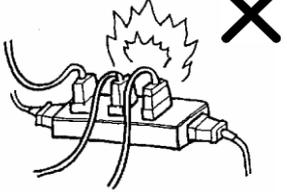
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 (～しないでください)
	この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 (～してください)
	この記号は、絵表示に対する行為を禁止する内容を告げるものです。

## 設置する時

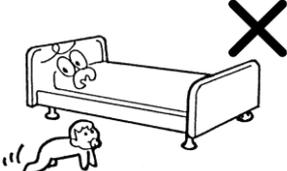
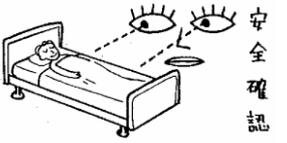
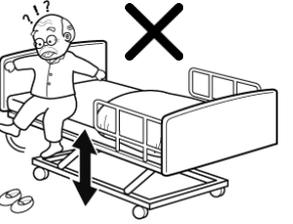
 <b>警告</b>	
必ずベッドの仕様に合った、弊社製のサイドレール、ベッド用グリップ、マットレスを使用してください。本取扱説明書に記載されている適合するサイドレール、ベッド用グリップ、マットレスを確認してください。 他社製品を使用すると、すき間が大きくなる可能性があり、思わぬ事故の原因となります。	 

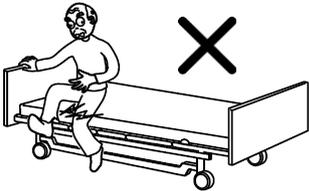
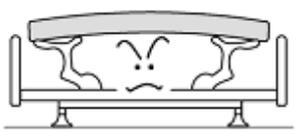
 <b>注意</b>	
ベッドの組み立て、分解は必ず弊社サービスマン、または販売店におまかせください。 ご自身で組み立て、分解すると重大な事故の原因となります。	
ベッドの設置時にボトムのすき間に指を挟まないように注意してください。	

<p>ベッドは、室内の突起物のない水平な場所で使用してください。</p> <p>平坦な場所以外、屋外、風呂場などで使用するとガタツキ、変形、故障、事故の原因となります。</p>		
<p>ベッドの重量に十分耐えられる床の強度を確保してください。また、床の材質によっては、ベッドフレーム設置面が傷つくことがありますので、極力カーペット類を使用して、床面の保護を行ってください。</p>		
<p>直射日光やエアコンからの風が直接当たる場所は避けてください。また、ストーブなどの熱器具、および火種になるものはベッドの近くに置かないでください。</p> <p>変形、変色、劣化、火災の原因になります。</p>		
<p>高温、多湿な場所は避けてください。</p> <p>反り、曲がり、サビ、カビ発生、破損などの原因になります。</p>		
<p>ヘッドボード、フットボード、脚部は確実に固定してください。</p> <p>思わぬ時に外れてケガをするおそれがあります。</p>		
<p>ベッドは、周囲の壁や家具などの障害物から離して置いてください。ベッドの周囲にものを置かないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ベッドの頭側／脚側（長手方向）：10 cm 以上</li> <li>● ベッドの両側（サイド）：5 cm 以上</li> </ul> <p>ベッドの動きにより周囲のものを破損したり、事故や故障の原因となります。</p>		
<p>部屋の中でコンセントの位置、家具の引出し、扉などの開閉などに支障がないことを確認してください。</p> <p>ベッドを組み立ててからの移動は困難になります。</p>		
<p>ベッド設置場所の上部に落下物を置かないでください。</p> <p>地震時などに落下物でケガをする原因になります。</p>		
<p>交流 100V、50/60Hz 以外の電源で使用しないでください。</p> <p>火災、感電の原因となります。</p>		
<p>固定脚を緩めたり、取り外したりしないでください。</p> <p>破損したり、ケガをするおそれがあります。</p>		

<p>電源コードの上に重いものをのせたり、コードがベッドの下敷きにならないようにしてください。</p> <p>コードに傷がついて、火災、感電の原因となります。</p>		
<p>電源プラグは直接コンセントに差し込み、コンセントや延長コードの容量を超える電気製品を同時に接続（たこ足配線）しないでください。</p> <p>火災の原因になります。</p>		

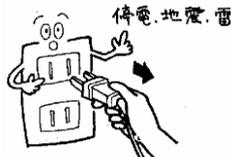
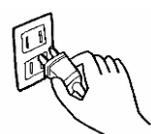
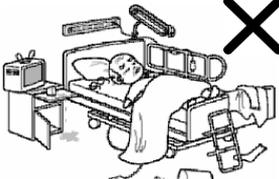
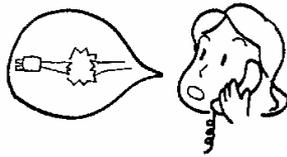
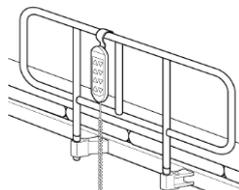
## 使用する時

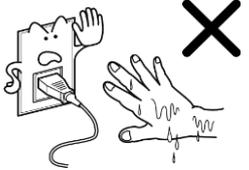
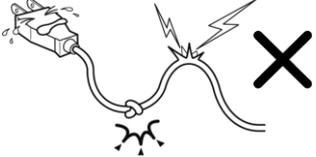
 <b>警告</b>		
<p>症状によっては、ベッド操作（背上げ、脚上げ、昇降）をすることにより、症状を悪化させる可能性があります。使用に際しては、医師の指示に従ってください。</p> <p>事故の原因となります。</p>		
<p>子供をベッドの近くで遊ばせないよう注意してください。また、子供のいたずらに注意してください。手元スイッチは、子供の手の届かない場所に置いてください。</p> <p>思わぬ事故の原因となります。</p>		
<p>背上げ操作は、寝ている人の頭がベッドの背上げ側にくるようにして、仰向けに寝た状態で行ってください。</p> <p>これ以外の姿勢では、寝ている人の身体に無理がかかります。</p>		
<p>手元スイッチでベッドの操作をする時には、使用者やベッド周辺、ベッドの下部、周辺の人やものの安全を確認するとともに、足元などにも注意しながら行ってください。また、なんらかの危険を感じた時には、すぐに操作を中止してください。特にサイドレール、ベッド用グリップを使用の際は十分に注意してください。</p> <p>人がケガをしたり、ものが破損するなど、事故の原因となります。</p>		
<p>移乗させる際はベッドの高さを適切な高さに調節して使用してください。</p> <p>思わぬケガをするおそれがあります。 3 Mタイプのみ</p>		
<p>ベッドの高さは適切な高さに調整して使用してください。端座位姿勢のとれる高さ、もしくは低めの位置での使用をおすすめします。</p> <p>ベッドの高さが合っていないと、乗り降りの際に転倒するおそれがあります。 3 Mタイプのみ</p>		

<p>ベッドから乗り降りする際は、ベッド本体のマットレスストッパーなどの突起物に衣類を引っかけないように注意してください。</p> <p>ケガをするおそれがあります。</p>		
<p>手元スイッチのボタン操作が確実にできない人、または身体の状況などの変化により、ボタン操作が確実にできなくなると思われる人には、操作をさせないでください。</p> <p>誤った操作による事故の原因となります。</p>		
<p>このベッドは大人用です。12歳以下の子供、新生児、幼児などには使用させないでください。</p> <p>また取扱説明書、注意ラベルの内容が理解できない方（認知症の方など）には使用させないでください。</p> <p>思わぬ事故の原因となります。</p>		
<p>ベッドの下や、起き上がったボトムとフレームの間に身体を入れないでください。</p> <p>挟まれてケガをするおそれがあります。</p>		
<p>サイドレールやヘッドボード、フットボードに腰掛けるなど、必要以上の荷重を加えないでください。</p> <p>破損したり、ケガをするおそれがあります。</p>		
<p>ベッドの上で飛び跳ねたり、背上げ状態で立ったり、腰掛けたりしないでください。</p> <p>破損したり、ケガをするおそれがあります。</p>		
<p>本製品は1人用です。2人以上で使用しないでください。</p> <p>重大な事故の原因になります。</p>		
<p>モーターの定格時間は2分です。それ以上は連続して使用しないでください。次に使用する時は、十分な時間をおき、モーターが冷えてから使用してください。</p> <p>故障の原因となります。</p>		
<p>サイドレールやベッド用グリップのすき間にコード類を入れないでください。</p> <p>背上げなどベッドの操作をするときに、コード類を挟み、事故や破損の原因となります。</p>		
<p>使用荷重は最大1700N（約170kg）です（使用者の最大体重は約135kgです）。体重とマットレスと付属品を含めた荷重が1700Nを超えるときは、使わないでください。</p> <p>ベッドの破損や重大な事故の原因となります。</p>	<p>1700N 以下</p> 	

<p>ベッドおよびサイドレール、ベッド用グリップは、破損した状態で使用しないでください。 火災や事故の原因となります。</p>		
<p>サイドレールやベッド用グリップの間から無理に降りたり乗り越えたりすることは絶対にしないでください。 重大な事故の原因となります。</p>		

## ⚠ 注意

<p>動作しないなど異常の時は、電源プラグをコンセントから抜き、本取扱説明書の「こんなときには」の項目をチェックしてください。チェックしても正常に動作しない場合は、ただちにベッドの使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社お客様相談室に修理を依頼してください。</p>		
<p>電動操作を長期間行わないときや、停電、雷、地震の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 そのままにしておきますと、事故や故障の原因となります。</p>		
<p>電源プラグをコンセントから抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。 コードが傷つくと、火災、感電の原因となります。</p>		
<p>ベッドの周辺を定期的に整理、整頓してください。 ベッドの周辺が乱れていると思わぬケガの原因となります。</p>		
<p>電源コードが傷んだり（芯線の露出、断線など）、動かないなど、異常の時は電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社お客様相談室へ連絡してください。 そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。</p>		
<p>手元スイッチのボタンは、必要な操作に合わせて1つずつ押してください。 複数のボタンを同時に押したり、不必要なボタンを押すと思わぬ動きをし、乗っている人や周囲の人がケガをするおそれがあります。</p>		
<p>手元スイッチを使用しないときは、ヘッドボードの外側やサイドレールやベッド用グリップの外側にかけてください。 ベッドの上やヘッドボード、サイドレールやベッド用グリップの内側などは無意識に触れて誤動作するおそれがあります。</p>		

<p>操作を禁止する場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。 無意識にボタンに触れて誤動作するおそれがあり、思わぬ事故の原因となります。</p>		
<p>頭側もしくは脚側から介助する場合は、必ずヘッドボード、フットボードを取り外してから行ってください。 ヘッドボード、フットボードに負荷がかかり、ベッドが破損するおそれがあります。</p>		
<p>ベッドから降りる際は、なるべく背上げした状態で行ってください。特に足腰に不安がある方はベッド用グリップの併用をおすすめします。</p>		
<p>衣服がめくれ上がった状態で乗り降りしないでください。 ケガをするおそれがあります。</p>		
<p>ベッドの上で、喫煙をしないでください。 破損、火災の原因になることがあります。</p>		
<p>濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしないでください。 感電するおそれがあります。</p>		
<p>電源や手元スイッチのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねたり、挟み込んだり、巻きつけたり、加熱したりしないでください。 コードが破損して、火災、感電の原因となります。</p>		
<p>モーターや手元スイッチ、その他の電気部品に水やジュースなどの液体をこぼさないでください。 故障や事故の原因となります。</p>		
<p>電源コードや手元スイッチは本製品の専用品です。他の目的に使用しないで下さい。 破損、火災、感電の原因となります。</p>		
<p>手元スイッチのボタンを爪や先の尖ったもので押したり、必要以上に強く押したりしないでください。 ボタンが破損するなどの原因となります。</p>		
<p>手元スイッチを落としたり、引きずったり、強引に引っ張ったりしないでください。 故障の原因となります。</p>		
<p>ヘッドボードやフットボードを持ってベッドを引きずらないでください。 ベッドが破損するおそれがあります。</p>		